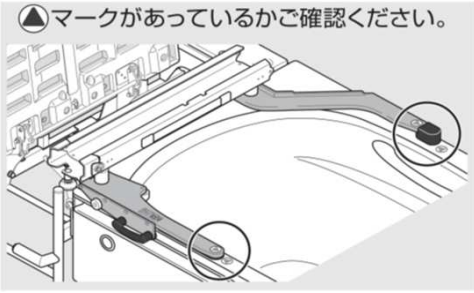
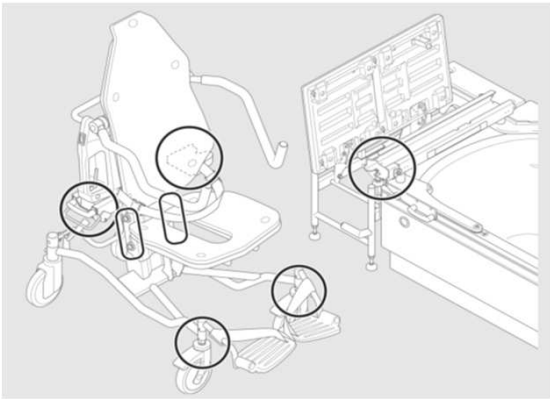


	項目	合否	備考
〈事前点検〉	1.浴槽レールは正しい位置に固定されていますか?  ▲マークがあっているかご確認ください。	合 / 否	マークが合わない場合は取扱説明書を参照し正しく固定してください
	2.下記のネジにゆるみはありませんか? ①前輪キャスターのロックナット(2ヶ所) ②キャリア高さ固定ネジ(標準タイプ 4ヶ所、フルタイプ 6ヶ所) ③分離ハンドル ④キャリア側の連結部 ⑤移乗台側の連結部 	合 / 否 合 / 否 合 / 否 合 / 否 合 / 否	ネジがゆるんでいる場合は使用を中止し、必ず弊社アフターサービスセンターまでご連絡ください
	3.キャスターのロックは正常にかかりますか?	合 / 否	ロックがかからない場合は使用を中止し、必ず弊社アフターサービスセンターまでご連絡ください
	4.バッテリーの残量はありますか?	合 / 否	残量がない場合は、充電してからご使用ください
	5.シートの昇降は正常にできますか?	合 / 否	取扱説明書を参照し対処方法を確認してください
	6.マットはチェアと移乗台に正しく取り付けられていますか?	合 / 否	取扱説明書を参照し正しく取り付けてください
	7.浴槽レールやレール脚がズレて浴槽から外れることはありませんか?	合 / 否	ズレたり外れる場合は、使用を中止し、必ず弊社アフターサービスセンターまでご連絡ください
	8.リフトキャリアとレールの接続は正常ですか?	合 / 否	問題がある場合は、使用を中止し、必ず弊社アフターサービスセンターまでご連絡ください
	9.シートのスライドはスムーズにできますか?	合 / 否	取扱説明書を参照し対処方法を確認してください
	10.安全ベルトはチェアに正しく取り付けられていますか?	合 / 否	取扱説明書を参照し正しく取り付けてください
	11.操作中、気になるガツつきはありませんか?	合 / 否	ガツつきがある場合は、使用を中止し、必ず弊社アフターサービスセンターまでご連絡ください
	12.操作中、気になる音はしませんか?	合 / 否	異音がある場合は、使用を中止し、必ず弊社アフターサービスセンターまでご連絡ください
	13.消耗品は劣化していませんか?	合 / 否	劣化している場合は、使用を中止し、必ず弊社アフターサービスセンターまでご連絡ください
〈事後点検〉	14.バッテリーを外して充電しましたか?	合 / 否	取扱説明書を参照し充電してください
	15.充電器の電源コードは劣化、ひび割れ・傷はありませんか?	合 / 否	